



Novedades Actualización

Control-IQ V7.7

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Nueva gestión de las actividades Control-IQ™

Nuevo menú de Actividades con la siguientes novedades:



Ahora es posible programar la duración de la Actividad Ejercicio entre 30 minutos y 8 horas.

La Actividad Ejercicio se desactivará automáticamente una vez finalizada la duración establecida.



Ahora al activar una actividad si hay otra actividad en marcha se detendrá automáticamente.

t:slim X2

Bomba de insulina

CON TECNOLOGÍA Control-IQ

Versión 7.7

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Nuevo patrón de notificaciones

Cambios en el patrón de notificaciones para facilitar el reconocimiento de los recordatorios, alertas y alarmas.

Prioridad Alta

Mal funcionamiento o alarmas que interrumpen el suministro.

3 secuencias de 3 tonos

Prioridad Media

Alertas que pueden impactar en el suministro de insulina.

2 secuencias de 3 tonos

Prioridad Baja

Alertas que no impactan en el suministro de insulina.

1 secuencia de 3 tonos

No prioritarias

Notificaciones informativas.

1 secuencia de 2 tonos

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Compatibilidad con Dexcom G6 y Dexcom G7

Control-IQ™ 7.7 permite seleccionar entre dos sensores: Dexcom G6 y G7.

Componentes	 DEXCOM G6	 DEXCOM G7
Tamaño (cm ancho x largo)	Sensor + transmisor 3,05 x 4,57	Todo en uno 2,4 x 2,73 60% más pequeño*
Duración	10 días	10 días + 12 h periodo de gracia
Calentamiento	2 horas	30 minutos

* Comparado con Dexcom G6.

Estos productos cumplen con la legislación vigente para productos sanitarios.

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Compatibilidad con Dexcom G7

Características

Lugar de inserción

Insertar sensor

¿Cómo iniciar?

Componentes del sistema



Este producto cumple con la legislación vigente para productos sanitarios.

- Sensor y transmisor integrados.
- Fácil de insertar.
- Periodo de calentamiento de 30 minutos
- Duración del sensor 10 días con 12 horas de periodo de gracia.

Teléfonos compatibles:

<https://www.dexcom.com/compatibility>

4/8

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Compatibilidad con Dexcom G7

Características

Lugar de inserción

Insertar sensor

¿Cómo iniciar?



A partir de 7 años.



Entre 2 y 6 años.



- Lavarse las manos y desinfectar la zona con alcohol.
- Evitar administrar insulina a menos de 8 cm del sensor.
- No insertar el sensor en zonas con cicatrices, tatuajes o zonas con lesiones.
- Evitar lugares donde se puedan producir golpes o presiones.

5/8

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Compatibilidad con Dexcom G7

Características

Lugar de inserción

Insertar sensor

¿Cómo iniciar?



Este producto cumple con la legislación vigente para productos sanitarios.

1. Desenroscar tapa.
2. Presionar en la piel y pulsar botón.
3. Retirar aplicador.



Para la inserción, siga las instrucciones que se encuentran dentro de cada caja del sensor Dexcom G7.

6/8

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



Compatibilidad con Dexcom G7

Características

Lugar de inserción

Insertar sensor

¿Cómo iniciar?



Este producto cumple con la legislación vigente para productos sanitarios.

- Iniciar sensor.
- Introducir código de emparejamiento.
- Introducir código por segunda vez.

Si tiene un teléfono compatible, puede emparejarlo también a su sensor descargando la aplicación Dexcom G7.

Novedades y nuevas funciones en la versión Control-IQ V7.7



IMPORTANTE: Descargue la Guía de usuario

Para que pueda obtener el máximo partido a las nuevas funcionalidades descárguese la

Guía de usuario
Control-IQ™ v7.7

¿Tiene alguna duda o incidencia?
Contacte con el Soporte Técnico 900 103 443 o [escribanos](#).

novalab

La actividad de diabetes de

Air Liquide
HEALTHCARE

Air Liquide Healthcare España
Orense 34 3º 28020 Madrid • 918 024 515
info-novalab@airliquide.com
www.novalab.es